

Zenit PRO Onderhoud

Inhoud

1. Dagelijks onderhoud.....	2
1.1 Voor de run.....	2
1.2 Na de run	2
2. Wekelijks onderhoud	3
3. Tweewekelijks onderhoud	3
4. Maandelijks onderhoud	3

1. Dagelijks onderhoud


1.1 Voor de run


Alvorens het toestel op de starten worden volgende stappen uitgevoerd:

- Waste leegmaken (rood).
- Tubing van de buffer aansluiten op de bufferfles (groen) en volume hiervan controleren. Op maandag en donderdag wordt de bufferfles geleidigd en gestart met een nieuw opgeloste PBS-buffer.
- Wash bijvullen met AD indien nodig (zwart).
- Posities van glaasjes op de sliderack reinigen met alcoholdoekje, dit om eventuele resten van mounting medium te verwijderen.
- Zuignapje waarmee dekglasjes genomen worden reinigen met alcoholdoekje.

1.2 Na de run

Als de run volledig afgerond is kan het toestel afgesloten worden.

- Klik op .
- Toestel vraagt of je zeker bent, klik op 'Yes'. Nadien vraagt toestel of er een 'End of day wash' moet uitgevoerd worden. Kies hierbij 'Yes'.
- Een pop-up scherm verschijnt:

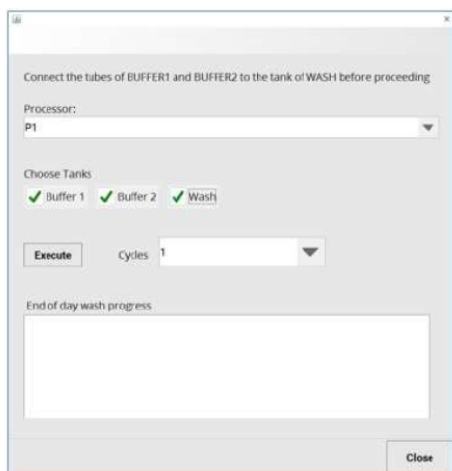

- Duidt bij 'Choose Tanks' buffer 1 en wash aan (buffer 2 is niet aangesloten), aantal cycles blijft staan op 1. Tubing van de buffer moet hiervoor terug aangesloten worden op de washtank. Zorg er ook voor dat er voldoende AD zit in de washtank.
- Klik op 'Execute'.
- End of day wash duurt ongeveer 3,5 minuten, nadien zal het toestel automatisch uitschakelen.

2. Wekelijks onderhoud

Dit onderhoud wordt uitgevoerd op vrijdag.

- Reinig de 3 naalden achteraan met een alcoholdoekje.
- Reinig het toestel zowel vanbinnen als vanbuiten met een vochtige doek (niet deze in de schuif, deze mag nooit nat worden!).

3. Tweewekelijks onderhoud

NVT

4. Maandelijks onderhoud

1 keer per maand worden de leidingen gespoeld met javel. Dit gebeurt na de run en doen we als volgt:

- Vul de washtank met javel 1/10 (100 ml javel + 900 ml AD).
- Sluit zowel de tubing van de buffer als van de wash aan op de washtank.
- Klik op 'End of day wash', duidt Buffer 1 en Wash aan en pas het aantal cycles aan naar 2.
- Klik op 'Execute'.
- Spoel de washtank nadien goed uit met lauw kraantjeswater en vul deze ook hiermee.
- Sluit opnieuw de twee tubings (buffer en wash) aan op de washtank.
- Herhaal de 'End of day wash' met 2 cycles.
- Spoel de washtank nadien goed uit met AD en vul deze ook met AD.
- Sluit opnieuw de twee tubings (buffer en wash) aan op de washtank.
- Herhaal de 'End of day wash' met 2 cycles.

Nadien mag het toestel afgesloten worden. Wanneer het toestel vraagt of er een 'End of day wash' moet uitgevoerd worden, klik dan op 'No' aangezien deze reeds werd uitgevoerd tijdens het maandelijks onderhoud.